

**Renfert**

making work easy

**NEW**



# Renfert-Scanspray classic

**NEU** Mattierungsspray in der XL-Dose

# NEU Renfert-Scanspray classic

## Mattierungsspray in der XL-Dose

Renfert-Scanspray classic\* ist ein feinkörniges 3D-Mattierungsspray für das extraorale Scannen von glänzenden oder stark reflektierenden Oberflächen (z. B. Modelle, Primärkronen, Gerüste) und überzeugt durch hohe Ergiebigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die extragroße XL-Dose für Poweruser.

### Vorteile

- Hohe Feinkörnigkeit und feiner, homogener Schichtauftrag für detailgenaue Scanergebnisse.
- Exakte Kantendarstellung und hohe Opazität für das hochpräzise Digitalisieren von Objekten.
- XL-Format (500 ml) für eine besonders wirtschaftliche Anwendung.
- TiO<sub>2</sub>-frei - ohne Titandioxid.

### Details

- Keine Flocken- und Blasenbildung (Agglomeration) und somit eine deutliche Reduktion von Dimensionsfehlern.
- Dank geringem und mikrofeinem Schichtauftrag hohe Ergiebigkeit.
- Spezielles Pulverventil ermöglicht feinsten Sprühnebel für ein punktgenaues Mattieren.
- Optimale Haftung auch auf polierten Oberflächen (Keramik, Metall etc.) sorgt für eine einfache Anwendung.
- Schnelle Trocknungszeit und einfache Entfernbarkeit unterstützen den effizienten Arbeitsablauf.

### Making work easy

Mit dem Renfert-Scanspray classic lassen sich alle denkbaren Materialien mattieren, sodass relevante Oberflächenmerkmale sowie Makro- und Mikrotexturen präzise vom 3D-Laborscanner (auch älterer Baujahre) zu erfassen sind.




**PREMIUM QUALITY**  
**MADE IN GERMANY**



Homogener Schichtauftrag für detailgenaue Scanergebnisse


### Der Weg zur besten Qualität!

Anwendung: Um die volle Leistung und die hohe Qualität des Produktes nutzen zu können, sind zwei Punkte zu beachten:

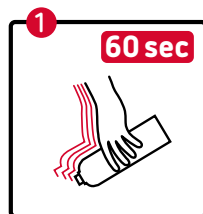

#### Schütteln

Vor jedem Gebrauch die Dose 60 Sekunden kräftig über Kopf schütteln. Die integrierte Kugel muss deutlich hörbar sein.

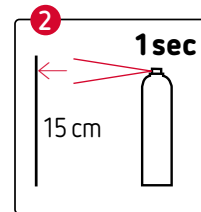

#### Auftrag

Der Sprühabstand zum Objekt soll 15 cm betragen. In 1-sekündigen Sprühstößen mit leichter Bewegung aufsprühen.

### Bestellinformationen

Renfert-Scanspray classic, 500 ml

No. 17311000

\* nur in ausgewählten Märkten verfügbar