



Descalcificación POWER steamer 1+2

Por favor tenga en cuenta

- ☑ Enjuague el aparato regularmente con agua, o semanalmente cuando se utiliza un ablandador a base de sal. Siga las instrucciones del manual de instrucciones.
- ☑ Utilice únicamente el descalcificador Renfert "POWER steamer descaler" (contiene protección contra la corrosión).
- ☑ Otros descalcificadores no aprobados como el ácido cítrico pueden dañar el depósito de presión
- ☑ ¡Advertencia: la solución descalcificadora es corrosiva!
- ☑ ¡Use gafas de seguridad y guantes de protección durante la descalcificación!
- ☑ No utilice el aparato durante la descalcificación.
- ☑ El orificio de llenado debe permanecer abierto durante todo el proceso de descalcificación.



Step-by-step

1. Desconecte el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar por completo.
2. Abra la abertura de revisión.
3. Enjuague el depósito de presión con agua y con la ayuda del cepillo de limpieza.
4. Cierre la abertura de revisión.
5. Vierta 1 litro de agua en el depósito de presión. A continuación, agregue 1 litro de "Renfert POWER steamer descaler".
6. Después de unos 15 minutos, llene el aparato, poco a poco, con 0,6 - 0,8 l más de agua. Si se forma espuma, no siga llenándolo hasta que la espuma se haya asentado.
7. Para calcificaciones más ligeras 2-4 h, en caso de suciedad más intensa, dejarla durante 8-14 h.
8. Abra con cuidado la abertura de revisión y vacíe la solución descalcificadora.
9. La solución descalcificadora utilizada muy diluida puede eliminarse por el desagüe.
10. Aclare el recipiente a presión varias veces con agua y cepíllelo.

Más información

En nuestro sitio web encontrará más información, como instrucciones, hojas de datos de seguridad, vídeos de aplicación, etc.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

