

Renfert

making work easy

NOUVEAU



Renfert-Scanspray classic

NOUVEAU Spray matifiant proposé dans une bombe XL

NOUVEAU Renfert-Scanspray classic

Spray matifiant proposé dans une bombe XL

Renfert-Scanspray classic* est un spray matifiant 3D très fin qui a été conçu pour le scan extra-oral de surfaces brillantes ou très réfléchissantes (p. ex. des modèles, couronnes primaires, armatures) avec un scanner de laboratoire et qui se distingue par son emploi très économique et sa bombe XL idéale pour une utilisation fréquente.

Avantages

- Texture très fine et application d'une couche très mince et homogène pour garantir la saisie de tous les détails.
- Rendu exact des bords et grande opacité permettant la numérisation ultraprécise d'objets.
- Format XL (500 ml) pour une utilisation encore plus économique.
- Sans TiO₂ - sans dioxyde de titane.

Détails

- Ne forme pas de flocons ni de bulles (agglomération) ce qui réduit considérablement le risque d'erreurs dimensionnelles.
- Très économique grâce à l'application d'une couche ultrafine et donc d'une faible quantité de produit.
- La buse spéciale permet une pulvérisation très fine pour matifier les surfaces de manière ciblée.
- L'adhérence optimale, également sur les surfaces polies (céramique, métal etc.), garantit une utilisation simple.
- Sèche rapidement et s'enlève facilement pour assurer un travail efficace.




PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Application d'une couche homogène pour la saisie de tous les détails


Comment obtenir la meilleure qualité

Application: Pour profiter pleinement de la performance et de la haute qualité du produit, il faut respecter deux points:

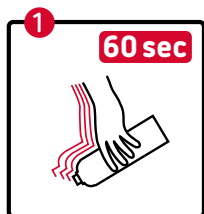

Agiter

Avant chaque emploi, agiter énergiquement la bombe aérosol la tête en bas pendant 60 secondes. La bille intégrée doit être nettement audible.

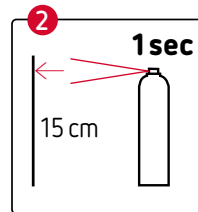

Application

La distance de pulvérisation devrait être de 15cm de l'objet. Appliquer en coups d'une seconde avec un léger mouvement.

* Disponible uniquement sur des marchés sélectionnés

Référence

Renfert-Scanspray classic, 500 ml

No. 17311000