

Decalcificazione POWER steamer 1+2



Importante!

- ☑ Sciacquare regolarmente l'apparecchio con acqua, a intervalli settimanali se si utilizza un addolcitore a base di sale. Seguire le istruzioni del manuale d'uso.
- ☑ Utilizzare esclusivamente il decalcificante Renfert e "POWER steamer descaler" (contiene una protezione anticorrosione)
- ☑ Altri decalcificanti come l'acido citrico possono danneggiare il serbatoio a pressione
- ☑ Attenzione: La soluzione decalcificante è corrosiva!
- ☑ Indossare occhiali protettivi e guanti protettivi!
- ☑ Non utilizzare l'apparecchio durante la decalcificazione
- ☑ L'apertura di riempimento deve rimanere aperta durante l'intero processo di decalcificazione!



Step-by-step

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete e lasciarlo raffreddare completamente.
2. Aprire l'apertura di ispezione.
3. Lavare il serbatoio a pressione con acqua e usando la spazzola di pulizia.
4. Chiudere l'apertura di ispezione.
5. Versare 1 litro d'acqua nel serbatoio a pressione. Quindi aggiungere 1 litro di decalcificante "Renfert POWER steamer descaler".
6. Dopo circa 15 minuti versare altri 0,6 - 0,8 l circa d'acqua nell'apparecchio. Se si sviluppa schiuma, continuare con il riempimento solo dopo che la schiuma si è stabilizzata.
7. Lasciare agire per 2 - 4 ore per il calcare leggero, 8 - 14 ore per il calcare pesante.
8. Aprire con cautela l'apertura di ispezione e scaricare la soluzione decalcificante.
9. La soluzione decalcificante esausta può essere smaltita nelle acque reflue dopo averla molto diluita.
10. Sciacquare più volte il serbatoio a pressione con acqua e pulirlo servendosi della spazzola apposita.



Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni, come istruzioni, schede di sicurezza, video applicativi ecc. sono disponibili sul nostro sito web.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

