

**Renfert**

making work easy

**NOVO**

formula & cor  
melhoradas



# Occlutec Spray

**NOVIDADE** Spray para oclusão



# NOVIDADE Occlutec Spray

## Spray para oclusão

Graças às cores brilhantes melhoradas, o Occlutec Spray oferece uma marcação particularmente clara e detalhada dos pontos de contato nas áreas de fundição de modelos, coroas e pontes.

### Vantagens

- Cores particularmente brilhantes para uma ótima marcação.
- Ótima dosagem devido ao micropulverização.
- Jato de spray homogêneo, independentemente do nível de material restante no recipiente.

### Detalhes

- Cor ideal.
- Rendimento do spray significativamente maior.
- É 100% lavável com água; sem resíduos.


### Making work easy

O Occlutec Spray com fórmula de cor melhorada é otimizado para a tecnologia analógica e digital em prótese dentária. Aqui, a exigência de precisão e limpeza no laboratório dentário se une a sólida qualidade e eficiência econômica. E assim, o resultado é o típico da Renfert: "making work easy".




### Como obter a melhor qualidade

Aplicação: Para poder aproveitar todo o desempenho e a elevada qualidade do produto, devem ser observados dois pontos:

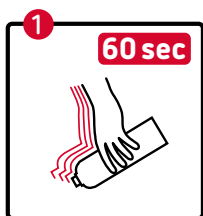

#### Agitar

Antes de cada utilização agitar vigorosamente a lata virada para baixo durante 60 segundos. A esfera integrada deve ser claramente audível.


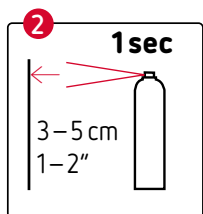


#### Aplicação

A distância de pulverização do objeto deve ser de 3-5 cm. Pulverizar em rajadas de 1 segundo com uma ligeira atuação.

### NOVIDADE: Cores brilhantes!

Nova fórmula, nova cor. As cores particularmente brilhantes proporcionam uma ótima marcação e facilitam a identificação dos pontos de contato.

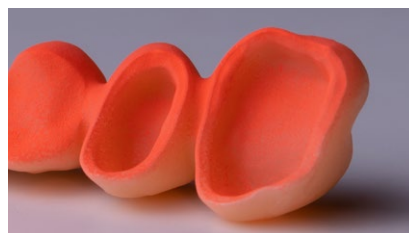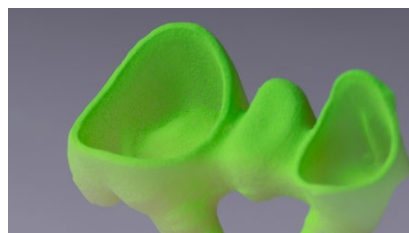

PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY

### Informações para encomenda

Occlutec Spray verde	75 ml	Nº 19352000
Occlutec Spray vermelho	75 ml	Nº 19353000