



# Détartrage POWER steamer 1+2

## À noter!

- ☑ Rincer périodiquement l'appareil à l'eau, une fois par semaine en cas d'utilisation d'un adoucisseur d'eau à base de sel. Respecter également les consignes du mode d'emploi.
- ☑ Détartrer uniquement avec le détartrant Renfert "POWER steamer descaler" (contient un agent anticorrosion).
- ☑ D'autres détartrants non autorisés comme l'acide citrique risquent d'endommager la cuve sous pression.
- ☑ Attention: la solution de détartrage est corrosive!
- ☑ Porter des lunettes et des gants de protection lors du détartrage!
- ☑ Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant la durée de détartrage!
- ☑ L'orifice de remplissage doit rester ouvert pendant toute la procédure de détartrage!



## Step-by-step

1. Débrancher l'appareil du secteur et laisser le refroidir.
2. Ouvrir l'ouverture de révision.
3. Rincer le réservoir à pression avec de l'eau par l'ouverture de révision et le nettoyer à l'aide de la brosse.
4. Fermer l'ouverture de révision.
5. Verser 1 l d'eau dans le réservoir sous pression, ajouter ensuite 1 l de "POWER steamer descaler".
6. Au bout d'env. 15 minutes, verser doucement 0,6 à 0,8 litre d'eau dans l'appareil. En cas de formation de mousse, attendre qu'elle disparaisse avant de continuer à verser.
7. Pour les calcifications légères laisser agir 2-4 h, pour les calcifications plus fortes 8-14 h.
8. Ouvrir prudemment le bouchon de l'ouverture de révision et vider la solution de détartrage.
9. La solution de détartrage usagée peut être rejetée aux égouts après avoir été fortement diluée.
10. Rincer le réservoir à pression plusieurs fois et le nettoyer à l'aide de la brosse.

## Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires telles que les instructions, les fiches de données de sécurité et des vidéos d'application sont disponibles sur notre site.



[www.renfert.com/  
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/  
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

