

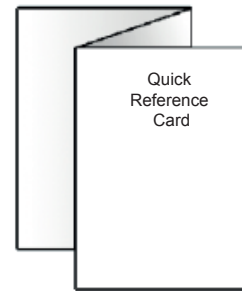
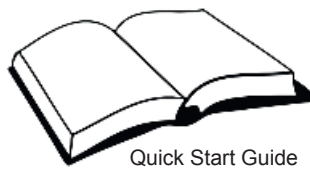
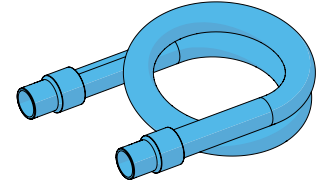
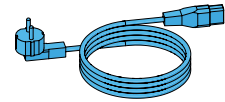


SILENT compact

Quick Reference Card

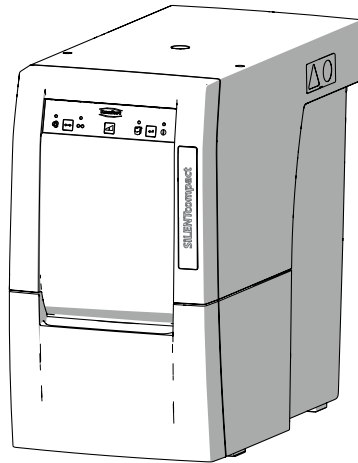


DE	Beachten Sie die Sicherheitshinweise im beiliegenden Quick Start Guide und informieren Sie sich in der vollständigen Bedienungsanleitung im Internet unter www.renfert.com
EN	Please observe the safety instructions in the supplied Quick Start Guide, the complete Instructions for Use can be found in the Internet under www.renfert.com
FR	Veillez respecter les consignes de sécurité figurant dans le guide de démarrage (Quick Start Guide) joint et consultez le mode d'emploi complet disponible sur Internet à l'adresse www.renfert.com
IT	Rispettate le avvertenze per la sicurezza riportate nella Guida di installazione rapida fornita in dotazione. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale di Istruzioni per l'uso completo sul nostro sito Internet www.renfert.com
ES	Cumpla las instrucciones de seguridad de la Guía de inicio rápido que se adjunta e infórmese con ayuda del manual de instrucciones completo en Internet, en www.renfert.com
RU	Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в прилагаемом кратком практическом руководстве, и изучите полную инструкцию по эксплуатации в интернете на сайте www.renfert.com

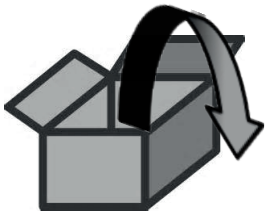

www.renfert.com

ON / OFF

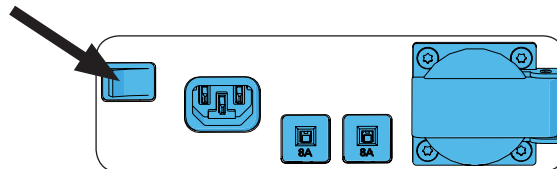

Tasten / Keys / Clés / Tasto / Teclas / Ключи



- Betriebsart umschalten (Automatikbetrieb / Dauerbetrieb)
- Select operating mode (automatic operating / continuous operating)
- Sélection du mode de fonctionnement : mode automatique / fonctionnement continu
- Selezione del modo operativo: Automatico / Continuo
- Seleccionar el modo: modo automático / modo continuo
- Выбор режима работы: автоматический режим работы / длительный режим работы



- Saugstufe (1 / 2)
- Suction levels (1 / 2)
- Niveau d'aspiration (1 / 2)
- Livello di aspirazione (1 / 2)
- Niveles de aspiración (1 / 2)
- Степени всасывания (1 / 2)



- Einstellung bestätigen / Werte speichern
- Confirm setting / save values
- Confirmation des paramètres / Enregistrement des données
- Conferma impostazioni / Salvataggio valori
- Confirmar ajuste / Guardar valores
- Подтвердить настройку / Сохранить параметры


Anzeigen / Display / Afficheur / Display / Display / Дисплей




- Automatikbetrieb
- Automatic operating
- Mode automatique
- Automatico
- Modo automático
- Автоматический режим работы



- Dauerbetrieb
- Continuous operating
- Fonctionnement continu
- Modo operativo continuo
- Modo continuo
- Длительный режим работы

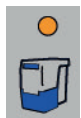


- Staubschublade leeren
- Empty dust drawer
- Vidage du tiroir à poussière
- Svuotamento del cassetto raccogli-polvere
- Vaciar la gaveta de polvo
- Опорожнение контейнера для сбора пыли

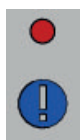


- Fehler
- Error
- Erreur
- Errore
- Error
- Проблема

- Einschaltswelle programmieren.
- Programme the turn-on threshold
- Programmation d'un seuil de mise en route
- Programmazione soglia di attivazione.
- Programar umbral de conexión
- Программирование пускового порога


1.

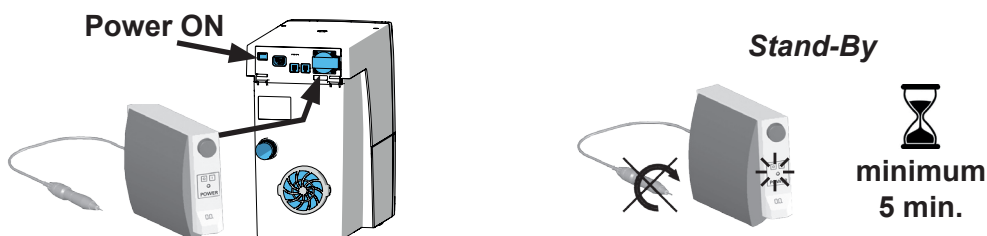


2.

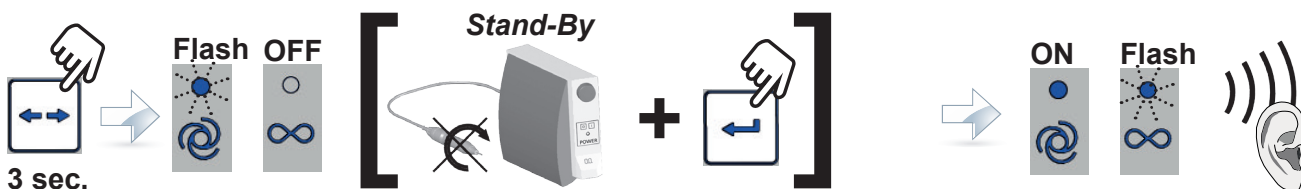

3.

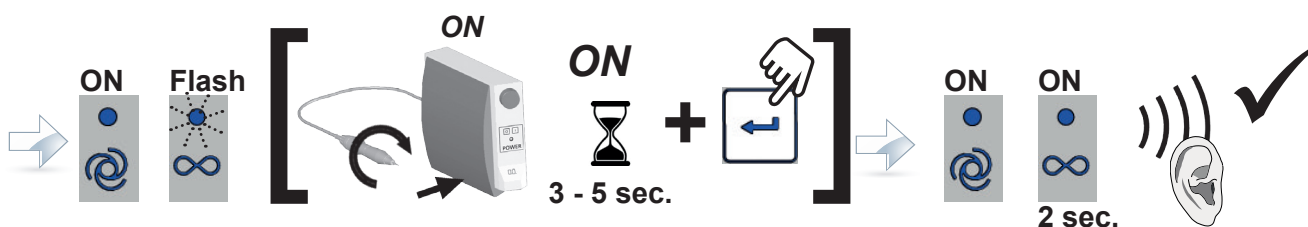

- Deaktivierung automatischer Anlauf im Automatikbetrieb
- Deactivating the automatic start in the automatic operation mode
- Désactivation du démarrage automatique en mode automatique
- Disattivazione dell'avviamento automatico nel modo operativo Automatico
- Desactivación del arranque automático en modo automático
- Деактивация автоматического запуска в автоматическом режиме работы

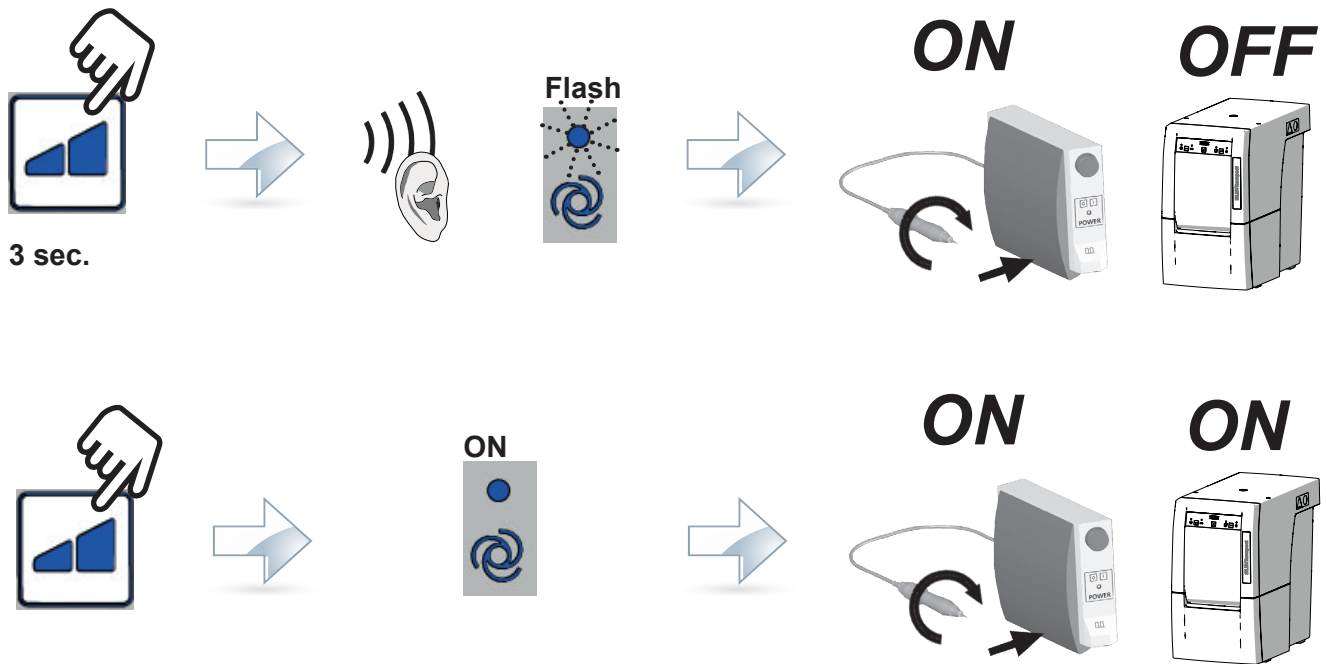

- Zeitintervall „Staubschublade leeren“ einstellen
- Setting the time period “Empty Dust Drawer”
- Réglage de la périodicité de vidage du tiroir à poussière
- Impostazione dell'intervallo di „svuotamento cassetto raccogli-polvere“
- Ajustar el intervalo de tiempo “Vaciar gaveta de polvo”
- Настройка интервала времени «Опорожнение контейнера для сбора пыли»

