

Renfert

making work easy

NOUVEAU formule & couleur améliorées



Occlutec Spray

NOUVEAU Spray d'occlusion



NOUVEAU Occlutec Spray

Spray d'occlusion

Grâce à ses couleurs lumineuses améliorées, Occlutec Spray offre un marquage particulièrement clair et détaillé des points de contact dans les domaines de la coulée de modèles, des couronnes et des bridges.

Avantages

- Couleurs particulièrement lumineuses pour une détection optimale.
- Dosage optimal grâce à un film micro-pulvérisé.
- Vaporisation homogène indépendante du niveau de produit restant dans le flacon.

Détails

- Couleur optimale.
- Le spray présente un meilleur rendement.
- S'enlève entièrement à l'eau, sans laisser de résidus.

Making work easy


Occlutec Spray présente une formule couleur améliorée et est optimisé pour la technique dentaire analogique et numérique. Ce produit de qualité et économique satisfait à toutes les exigences en matière de précision et de propreté au laboratoire dentaire. Le résultat est donc typique de Renfert : «making work easy».



NOUVEAU formule & couleur améliorées


Comment obtenir la meilleure qualité

Application: Pour profiter pleinement de la performance et de la haute qualité du produit, il faut respecter deux points:

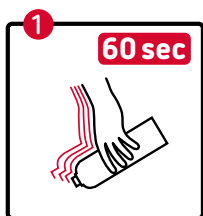

Agiter

Avant chaque emploi, agiter énergiquement la bombe aérosol la tête en bas pendant 60 secondes. La bille intégrée doit être nettement audible.

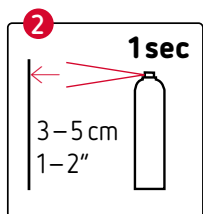


Application

La distance de pulvérisation devrait être de 3 à 5 cm de l'objet. Appliquer en coups de une seconde avec un léger mouvement.

NOUVEAU: Couleurs lumineuses!

Nouvelle formule, nouvelle couleur. Les couleurs particulièrement lumineuses créent un contraste optimal et facilitent l'identification des points de contact.

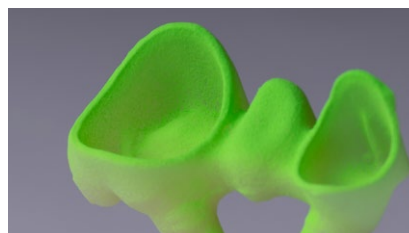

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

Référence

Occlutec Spray vert	75 ml	Réf. 19352000
Occlutec Spray rouge	75 ml	Réf. 19353000

Pour de plus amples informations sur le produit, voir : www.renfert.com/p/Référence