

Descalcificação POWER steamer 1+2



Por favor note que

- ☑ Lave o aparelho regularmente com água, ou uma vez por semana no caso de uso de um sistema de descalcificação à base de sal. Siga também as instruções do manual de operação.
- ☑ Para a descalcificação, utilizar exclusivamente descalcificador Renfert "POWER steamer descaler" (contém uma proteção contra corrosão).
- ☑ Outros descalcificadores não aprovados como o ácido cítrico podem danificar o recipiente de pressão
- ☑ Atenção: A solução de descalcificação é corrosiva!
- ☑ Durante a descalcificação, utilizar óculos e luvas de proteção!
- ☑ Não operar o equipamento durante a descalcificação
- ☑ A abertura de enchimento deve permanecer aberta durante todo o processo de descalcificação!

Step-by-step

1. Desligar o equipamento de rede e deixar resfriar totalmente.
2. Abrir a abertura de inspeção.
3. Lavar o recipiente de pressão com água e com o auxílio da escova de limpeza.
4. Fechar a abertura de inspeção.
5. Encher 1 l de água no recipiente de pressão. Em seguida, adicionar 1 l de descalcificador Renfert "POWER steamer descaler".
6. Após aprox. 15 minutos, continuar a encher lentamente o equipamento com aprox. 0,6 - 0,8 l. Caso forme espuma, continue a encher apenas após a espuma tiver assentado.
7. Para depósitos de sujeira mais leve de calcário, deixe agir de 2h a 4hs, para depósito de sujeira mais pesado de calcário, deixar agir de 8h a 14hs.
8. Abrir cuidadosamente a abertura de inspeção e drenar a solução de descalcificação.
9. A solução descalcificante usada pode ser descartada de forma muito diluída nas águas residuais.
10. Lavar o recipiente de pressão várias vezes com água e escovar com o auxílio da escova de limpeza.

Informações adicionais

Informações adicionais, tais como instruções, fichas de segurança e vídeos de aplicação, etc., podem ser encontrados em nosso site.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

