

**Renfert**

making work easy

**НОВЫЙ**



# Renfert-Scanspray classic

**НОВИНКА**

Матирующий спрей,  
баллончик размера XL

# НОВИНКА Renfert-Scanspray classic

## Матирующий спрей, баллончик размера XL

Renfert-Scanspray classic\* – это мелкозернистый 3D матирующий спрей для экстраорального сканирования глянцевых или сильно отражающих поверхностей (например, моделей, первичных коронок, каркасов). Он впечатляет своей высокой производительностью и экономичностью, а также сверхбольшим баллончиком XL, которого хватает надолго.

### Преимущества

- Особая мелкозернистость и тонкое, однородное нанесение слоя для получения детальных результатов сканирования.
- Точное отображение краев и высокая непрозрачность для высокоточной оцифровки объектов.
- Формат XL (500 мл) для особенно экономичного применения.
- Без TiO<sub>2</sub> - не содержит диоксид титана.

### Детали

- Никакого образования хлопьев и пузырьков (агломерации) и, следовательно, значительное снижение погрешности размеров.
- Большая производительность благодаря незначительному расходу и нанесению микротонкого слоя.
- Специальный клапан для порошка обеспечивает тончайшее распыление тумана для точного матирования.
- Оптимальная адгезия даже на полированных поверхностях (керамика, металл и т.д.) обеспечивает легкое нанесение.



PREMIUM QUALITY  
MADE IN GERMANY



Однородное нанесение слоя для получения детальных результатов сканирования


### Как достичь наилучшего результата

Применение: Для полного использования эксплуатационных характеристик и высокого качества продукта, необходимо соблюдать два пункта:



### Встряхнуть

Перед каждым использованием необходимо сильно встряхивать баллон в течение 60 секунд распылительной головкой вниз. Движение шара в баллоне должно быть хорошо слышно.

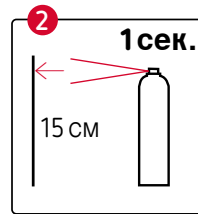

### Наносить

Расстояние от распылительной головки до объекта должно составлять 15 см. Наносите спрей 1-секундным нажатием при легком движении.

### Информация для заказа

Renfert-Scanspray classic, 500 мл

№ 17311000

\* доступно только на отдельных рынках